

EnviroPouch Use Instructions

Instrucciones para usar la bolsa EnviroPouch (Spanish)

Instruções para usar a bolsa EnviroPouch (Portuguese)

1) Clean all instruments thoroughly by soaking in a neutral pH detergent solution, hand scrubbing, or clean in an ultrasonic cleaner.

1) Lavar todos los instrumentos minuciosamente remojándolos en una solución de jabón con pH neutral, restregar con la mano, o limpiar con un limpiador ultrasónico

1) Lavar todos os instrumentos minuciosamente, molhando-os numa solução de detergente neutra em pH, esfregar com a mão, ou limpar com máquina ultrasonica.

2) Place cleaned instruments or cassette in an EnviroPouch, invert the cuff, and seal cuff or flap with steam process indicator tape.

2) Colocar instrumentos limpios o casete en bolsa EnviroPouch, invertir el dobladillo, y sellar dobladillo o pestaña con cinta indicadora para proceso al vapor.

2) Colocar instrumentos limpos ou casete na bolsa EnviroPouch, inverter a bainha, selar bainha ou aba com fita indicadora para processo a vapor

3) Always insert an indicator to show exposure to the sterilization process.

3) Siempre insertar un indicador para mostrar exposición al proceso de esterilización

3) Sempre inserir um indicador para mostrar exposição ao processo de esterilização.

4) Sterilize in a steam autoclave at 2500 F 16 to 18 psi for 20 minutes (recommended to extend EnviroPouch use life) or 2700 F 30 psi for 5 minutes.

4) Esterilizar en una autoclave a 2500 F 16 a 18 psi por 20 minutos (recomendado para prolongar el tiempo de uso de la bolsa EnviroPouch) o a 2700 F 30 psi por 5 minutos.

4) Esterilizar num autoclave a 2500 F 16 a 18 psi por 20 minutos (recomendado para estender o tempo de uso da bolsa EnviroPouch) ou a 2700 F 30 psi por 5 minutos.

5) Remove the EnviroPouch immediately and air dry or machine dry on low heat.

5) Retirar la bolsa EnviroPouch inmediatamente y secar al aire o en la máquina de secar a baja temperatura

5) Retirar a bolsa EnviroPouch imediatamente e secar ao ar ou na máquina de secar a uma temperatura baixa

- 6) EnviroPouch may be laundered in mild detergent on a mild setting (Do not use bleach).
- 6) La bolsa EnviroPouch se puede lavar con detergente suave en ciclo delicado (No usar cloro)
- 6) A bolsa EnviroPouch pode-se lavar com detergente suave em ciclo moderado (Não usar lixívia)
- 7) EnviroPouch has useful life of 200 sterilization cycles.
- 7) La bolsa EnviroPouch tiene una duración de 200 ciclos de esterilización.
- 7) A bolsa EnviroPouch tem uma duração de 200 ciclos de esterilização.
- 8) Storage conditions require normal ambient warehouse.
- 8) Condiciones para almacenaje requieren una temperatura ambiental normal de almacén.
- 8) Condições para armazenamento requerem uma temperatura ambiental normal de armazém.
- 9) Inspect pouch for damage prior to use.
- 9) *Inspeccionar bolsa para cualquier daño antes de usar.*
- 9) *Inspecionar bolsa para qualquer dano antes de usar*
- 10) Device is non-sterile.
- 10) Aparato no estéril
- 10) Aparelho não estéril



To Reorder Contact:
www.EnviroPouch.com
toll free 877-632-1991
office 770-632-1991
fax 770-742-0224
info@enviropouch.com